

Gebruiksaanwijzing Cryo Professional

Stap

Bepaal het type laesie wat behandeld moet worden.
Raadpleeg onderstaande tabel voor behandeltijden.

Tabel aanbevolen behandeltijden per laesies

Type laesies	Aanbevolen bevroeringstijden
Genitale wratten	40 seconden
Molluscum Contagiosum	20 seconden
Verruca (Plantaris, Vulgaris) (hand- en voetwratten)	40 seconden
Verruca (Plana)(platte wratten)	20 seconden
Fibroma, Acrochordon (steelwratten)	40 seconden
Seborrheic keratosis (SKs)	40 seconden
Aktinica keratosis (AKs) -> indien in het gezicht	15 seconden
Aktinica keratosis (AKs) -> indien op andere lichaamsdelen	40 seconden
Lentigo -> indien in het gezicht	15 seconden
Lentigo -> indien op andere lichaamsdelen	40 seconden

Behandel laesies in delen wanneer ze groter zijn dan 5mm.

Stap 2

Desinfecteer het gebied voorafgaand aan de behandeling om infectierisico te voorkomen.

Stap 3

Bepaal hoe de laesie het beste behandeld kan worden. Pas een voorbehandeling toe indien nodig. Het gebruiken van bijvoorbeeld keratolyticum zal geen averechts effect hebben op de doeltreffendheid van het product.

Indien de wrat bloed, dient dit eerst te worden gestopt voordat u de wrat behandelt met de Cryo Professional.

Stap 4

Bepaal welk formaat foamstaafje het beste kan worden gebruikt voor de laesie (2 mm of 5 mm). Plaats het foamstaafje in de aerosol.

Stap 5

Verwijder het beschermkapje van de drukknop en spuit het cryogeen op het foamstaafje tot er druppels van het foamstaafje vallen. Houd bij het satureren van het foamstaafje de aerosol altijd recht op en richt de aerosol NIET op de patiënt of andere personen in de kamer.

Activeer de aerosol NIET wanneer het foamstaafje in contact is met de laesie. Satureer ook NIET nogmaals het foamstaafje tijdens de behandeling. Hiermee neemt de reservoirfunctie van het foamstaafje af en daardoor de effectiviteit van de behandeling.

Stap 6

Draai de aerosol horizontaal in een hoek van 90 graden zodat het foamstaafje naar beneden is gericht.

Stap 7

Wacht 15 seconden zodat het foamstaafje op temperatuur kan komen.

Stap 8

Plaats het foamstaafje met lichte druk op de te behandelen laesie. Houdt het foamstaafje op de laesie, rekening houdend met de aanbevolen behandeltijd per type laesie, welke staat aangegeven in de tabel.

Houd het foamstaafje tijdens de behandeling verticaal naar beneden gericht.

Stap 9

Verwijder na de behandeling het foamstaafje uit de aerosol en gooi deze weg.

Stap 10

Herhaal de behandeling niet meer dan 4 keer met tussenpozen van 2 weken.

Potentiële bijwerkingen

Informeer uw patiënt over de mogelijke bijwerkingen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- Prikkelende of pijnlijke sensatie
- Blaarvorming
- Hypopigmentatie
- Inflammatoire hyperpigmentatie

Contra-indicaties

- Als er sprake is óf is geweest van een bevestigde diagnose van kanker óf dat er momenteel een behandeling tegen kanker wordt ondergaan
- Diabetici en patiënten met bloedsomloopstoornissen
- Patiënten met cryoglobulinemie
- Patiënten met auto-immuunziektes